

beurer

MP 70



RO **Baie de parafină**
Instrucțiuni de utilizare

Conținut

1. Pachet de livrare.....	2	7. Utilizare.....	6
2. Indicații de siguranță	2	8. Curățare.....	7
3. Prezentare	4	9. Piese de schimb și piese de uzură	8
4. Utilizarea conform destinației.....	5	10. Eliminarea ca deșeu.....	8
5. Descrierea aparatului	5	11. Date tehnice	8
6. Punerea în funcțiune	5		

Stimată clientă, stimat client,

Ne bucurăm că ați optat pentru un produs din sortimentul nostru. Marca noastră este sinonimă cu produse de calitate, testate riguros, din domenii precum căldură, greutate, tensiune, temperatură corporală, puls, terapie, masaj, frumusețe, bebeluș și aer.

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare, să le păstrați pentru consultarea ulterioară, să le puneți la dispoziție și altor utilizatori și să respectați indicațiile.

Cu deosebită considerație,
Echipa dumneavoastră Beurer

1. Pachet de livrare







- 1 baie de parafină MP 70
- 1 capac
- 1 grilaj de protecție
- 2 pungi a câte 450 g de parafină
- 30 de mănuși de plastic/pungi de plastic/folii de plastic/folii

 Avertizare

- Aparatul este destinat exclusiv utilizării în gospodărie/în mediul privat, nu în scop comercial.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii peste 8 ani și persoane cu capacitate fizică, senzorială sau mentală limitată sau fără experiență și cunoștințe necesare numai dacă sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele care rezultă din aceasta.
- Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul.
- Lucrările de curățare și întreținere destinate utilizatorului nu trebuie efectuate de copii fără a fi supravegheați.
- În cazul în care cablul de racordare la rețea al acestui aparat este deteriorat, acesta trebuie eliminat.

2. Indicații de siguranță**Explicația simbolurilor**

În instrucțiunile de utilizare, pe ambalaj și pe plăcuța de identificare a aparatului sunt utilizate următoarele simboluri:

 Avertizare	Indicație de avertizare privind pericolele de rănire sau pericolele pentru sănătatea dumneavoastră.
 Atenție	Indicație de siguranță privind posibile defecțiuni ale aparatului/accesoriilor.
	Acest simbol CE certifică faptul că produsul corespunde cerințelor impuse producătorului de către Comunitatea Europeană.
	Eliminare în conformitate cu prevederilor Directivei WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.
	Producător
	Aparatul prezintă izolație dublă de protecție și corespunde astfel clasei de protecție 2.

Indicații de siguranță importante de ținut cont anterior utilizării

Avertizare

- Aparatul trebuie utilizat numai în scopul descris în instrucțiunile de utilizare. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecțiuni produse ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau neglijente a aparatului. Acest aparat nu este adecvat pentru utilizarea în scopuri comerciale și în domeniul medical. Folosiți aparatul numai pentru uz personal.
- Reparațiile trebuie efectuate numai la punctele de service autorizate, deoarece sunt necesare unelte speciale și piese speciale pentru reparație. În caz contrar pierdeți garanția.
- Nu folosiți aparatul dacă suferiți de o boală cardiacă, roșeață a pielii, inflamații, umflături, zone sensibile, diabet, răni deschise, arsuri, eczeme, psoriazis sau capacitate redusă de a simți durerea.
- Nu folosiți aparatul dacă sunteți insensibil la căldură.
- În timpul sarcinii sau în cazul problemelor de sănătate consultați medicul anterior utilizării aparatului.
- Dacă suferiți de inflamații acute sau de boli vasculare periferice, consultați medicul înainte de a folosi aparatul.
- Nu utilizați niciodată baia de parafină fără parafină!
- Îndepărtați bijuteriile de la mâini și de la picioare anterior fiecărei utilizări.
- Nu încălziți niciodată parafina în ambalajul său de plastic! Nu încălziți niciodată parafina deasupra aragazului, deasupra flăcărilor deschise sau în cuptorul cu microunde! Încălziți parafina exclusiv în baia de parafină!
- Copiii nu sunt conștienți de pericolul la care se expun prin contactul cu aparatele electrice. Luați toate măsurile de precauție pentru a nu lăsa copiii să folosească aparatul nesupravegheați.
- Verificați înainte de fiecare utilizare dacă aparatul și cablul de alimentare sunt în stare intactă. În cazul deteriorării nu este permisă punerea în funcțiune a aparatului.
- Înainte de a conecta aparatul la rețeaua electrică verificați dacă tensiunea de rețea locală corespunde cu tensiunea indicată pe aparat.
- Nu folosiți aparatul în apropierea apei (de exemplu, cadă, chiuvetă etc.).
- Nu utilizați aparatul în timp ce faceți baie sau duș sau dormiți.
- Nu așezați aparatul în apă sau în alte lichide. Depozitați aparatul într-un loc sigur.
- Nu amplasați aparatul pe suprafețe sensibile!
- Când utilizați aparatul aveți grijă să fie așezat pe o suprafață solidă și netedă.
- Nu apropiați aparatul și cablul de alimentare de suprafețe fierbinți. Nu îl amplasați pe alte aparate; parafina fierbinte poate produce deteriorări.

- Nu folosiți aparatul în apropierea produselor de aerosol și a echipamentelor de alimentare cu oxigen.
- Nu utilizați aparatul în aer liber. Utilizați aparatul exclusiv în spații închise.
- Anterior utilizării, așezați cablul de alimentare în așa fel încât să nu existe pericol de împiedicare.
- Nu folosiți aparatul în pat, când dormiți sau când sunteți obosit.
- Nu utilizați aparatul sub pături, prosoape etc.
- Utilizați aparatul numai împreună cu accesoriile livrate.
- Nu umpleți baia de parafină în exces! Aveți grijă ca parafina topită introdusă să nu depășească marcajul MAX.
- Când ceara de parafină s-a topit complet, aceasta poate fi foarte fierbinte.
- Înainte de a introduce mâinile, picioarele sau coturile în parafina topită verificați mai întâi pe interiorul încheieturii mâinii dacă temperatura parafinei este potrivită.

Indicații de siguranță importante de respectat în timpul utilizării

Avertizare

- Opriți imediat aparatul dacă apare o defecțiune în timpul folosirii și scoateți ștecărul din priză.
- Nu aduceți ochii sau alte părți ale corpului sensibile la căldură în contact cu parafina fierbinte.
- Dacă resimțiți parafina în permanență prea caldă sau prea rece, poate fi un indiciu pentru o problemă fizică. În acest caz consultați medicul.
- Aveți grijă ca, în timpul utilizării aparatului, nivelul parafinei să ajungă întotdeauna cel puțin până la marcajul MIN.
- Nu mențineți parafina mai mult de 20 de minute pe zona tratată.
- În timpul utilizării, nu scuturați sau mișcați aparatul. Vă puteți opări sau arde.
- Dacă se află parafină fierbinte în baia de parafină, nu adăugați apă.
- Întrerupeți utilizarea dacă apar dureri, iritații, dermatită sau dacă nu vă simțiți bine și consultați medicul.
- Dacă aparatul a căzut din greșeală în apă, scoateți imediat ștecărul din priză. Dispuneți verificarea aparatului de către un electrician calificat anterior următoarei utilizări.

Indicații de siguranță importante de ținut cont după utilizare

Atenție

- Opriți aparatul după utilizare prin scoaterea ștecărului din priză.
- Nu scoateți niciodată ștecărul din priză trăgând de cablu sau atingându-l cu mâini ude.
- Nu folosiți obiecte tăioase sau ascuțite pentru a scoate blocul de parafină din baie. Puteți deteriora și zgâria baia de parafină.
- Dacă nu folosiți aparatul timp îndelungat, depozitați-l într-un loc uscat, răcoros și ferit de praf.
- Dacă mai aveți întrebări referitoare la utilizarea aparatelor noastre, vă rugăm adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienți.

3. Prezentare

Cu ajutorul băii de parafină MP 70 se topește parafina.

În parafina topită caldă se introduc în mod repetat mâinile, picioarele sau coturile uscate și crăpate, se mențin aici pentru scurt timp și se scot apoi. În jurul locului afectat se formează un strat subțire de parafină, peste care se trage suplimentar o mănușă de plastic. Datorită căldurii parafinei se deschid porii pielii și se elimină umiditate. Stratul de parafină împiedică ieșirea umidității. Aceasta pătrunde adânc în piele prin porii deschiși, fiind absorbită acolo. Astfel, pielea devine foarte moale și catifelată. După ce a acționat timp de 20 de minute, puteți îndepărta parafina de pe zona tratată.

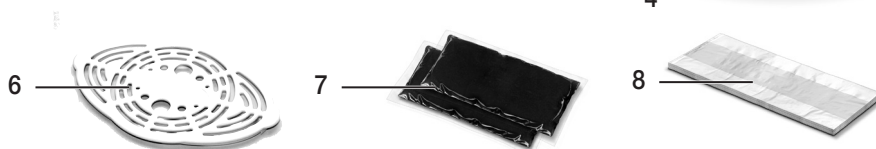
Suplimentar, căldura băii de parafină îmbunătățește circulația sanguină.

4. Utilizarea conform destinației

Acest aparat este destinat exclusiv utilizării pe mâinile, picioarele sau coturile omului.
Nu utilizați aparatul la animale!

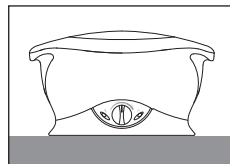
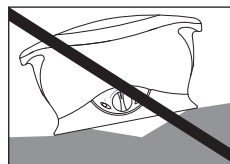
5. Descrierea aparatului

1. Baie de parafină
2. Capac
3. Bec de funcționare verde
4. Regulator de temperatură
5. Bec de încălzire roșu
6. Grilaj de protecție
7. Parafină
8. Mănuși de plastic



6. Punerea în funcțiune

- Înlăturați materialul de ambalare.
- Verificați dacă toate componentele sunt incluse în pachetul de livrare (consultați capitolul 1. Pachet de livrare).
- Verificați baia de parafină și cablul de alimentare cu privire la deteriorări.
- Amplasați baia de parafină pe o suprafață sau pe o masă netedă, stabilă, plană și insensibilă la apă.
- Aveți grijă ca baia de parafină să fie goală înainte de a o umple cu parafină.

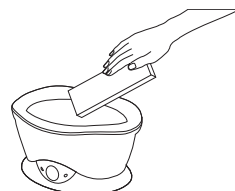


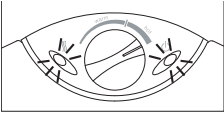

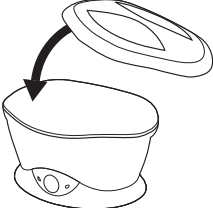
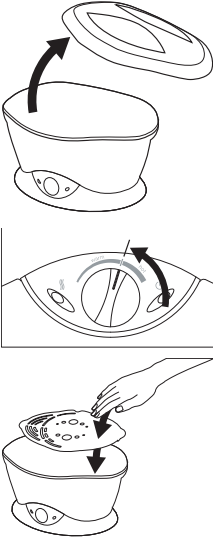
- Scoateți parafina din ambalajul de plastic.
- Introduceți cantitatea de parafină dorită (cel puțin 0,9 kg, cel mult 1,35 kg) în baia de parafină. Pentru a putea introduce parafina mai ușor în baie rupeți blocurile de parafină.



Atenție

Aveți grijă ca, înainte de punerea în funcțiune a aparatului, nivelul parafinei să ajungă întotdeauna cel puțin până la marcajul „MIN”.



<ul style="list-style-type: none"> • Introduceți ștecărul în priză (220–240 V, ~50/60Hz). La nivelul băii de parafină începe să lumineze becul de funcționare verde. Aparatul este acum pornit. Becul de încălzire roșu de la nivelul băii de parafină începe, de asemenea, să lumineze și se stinge abia când s-a atins treapta de căldură setată. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Aduceți regulatorul de temperatură în poziția „hot” pentru a topi parafina. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Așezați acum capacul pe baia de parafină și așteptați până când parafina s-a topit complet (durează aprox. 2-3 ore). <p>⚠ Avertizare Când baia de parafină este reglată la „hot” nu introduceți în niciun caz mâinile, picioarele sau coturile în parafină!</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • De îndată ce parafina s-a topit complet ridicați capacul. • Rotiți regulatorul de temperatură spre linia dintre „warm” și „hot”. • Introduceți grilajul de protecție din pachetul de livrare în parafina lichidă și așteptați până când ajunge la fundul băii de parafină. • Așezați capacul pe baia de parafină și așteptați aprox. 1 oră până când parafina a atins o temperatură ideală de utilizare (60 °C). <p>⚠ Avertizare Temperatura încăperii poate influența performanța aparatului și, astfel, temperatura cerii. Înainte de a introduce mâinile, picioarele sau coturile în baia de parafină verificați mai întâi pe interiorul încheieturii mâinii dacă temperatura parafinei este potrivită. Dacă se formează o pojghiță la suprafața parafinei, creșteți temperatura rotind regulatorul de temperatură spre dreapta. Dacă parafina vi se pare prea fierbinte, reduceți temperatura rotind regulatorul de temperatură spre stânga.</p>	

7. Utilizare

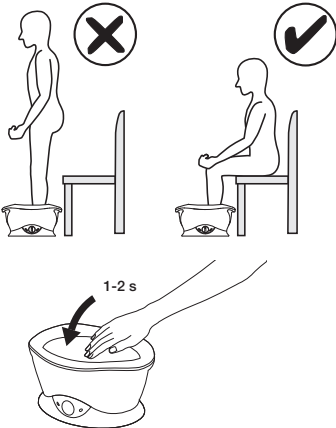
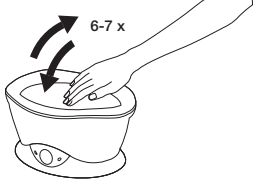
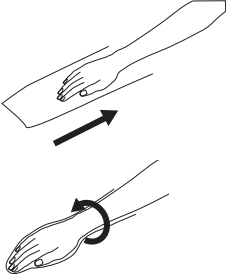

⚠ Avertizare

Înainte de a introduce mâinile, picioarele sau coturile în baia de parafină verificați mai întâi pe interiorul încheieturii mâinii dacă temperatura parafinei este potrivită.

⚠ Avertizare

Înainte de tratament scoateți toate bijuteriile (de exemplu, ceasuri, inele etc.).

După ce ați realizat pregătirile necesare din „Capitolul 6. Punerea în funcțiune”, puteți începe cu utilizarea. Pentru a începe, realizați următorii pași:

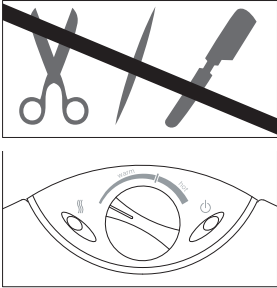
<ul style="list-style-type: none"> Vă recomandăm ca, înainte de tratament, să ungeți zona de tratat cu o loțiune de mâini cu lanolină. În felul acesta obțineți rezultate mai bune și puteți îndepărta mai ușor parafina după tratament. <p>⚠ Avertizare Când folosiți baia de parafină la picioare, este obligatoriu să ședeți. Nu stați niciodată în picioare în baia de parafină!</p> <ul style="list-style-type: none"> Introduceți timp de 1-2 secunde zona de tratat (mână, picior sau cot) în parafina lichidă. Scoateți-o apoi și așteptați până când parafina s-a întărit. În acest timp nu trebuie să mișcați zona tratată pentru ca parafina să se poată întări mai bine. 	
<ul style="list-style-type: none"> Repețiți de 6-7 ori procedura de introducere și scoatere până când s-au format mai multe straturi de parafină pe zona de tratat. În cazul în care, în timpul tratamentului, parafina vi se pare prea caldă sau prea rece, rotiți regulatorul de temperatură în direcția acelor de ceasornic sau în direcția opusă acelor de ceasornic pentru a mări, respectiv reduce temperatura parafinei. 	
<ul style="list-style-type: none"> Așezați acum o mănușă de plastic pe locul tratat, apăsați-o pe parafină și strângeți-o la deschidere. Purtați mănușa de plastic timp de 20 de minute. <p>⚠ Avertizare Dacă purtați mănuși de plastic în picioare, nu umblați prin locuință. Există pericolul de alunecare!</p>	
<ul style="list-style-type: none"> După 20 de minute îndepărtați mănușa de plastic împreună cu stratul de parafină de pe zona tratată. Eliminați mănușa de protecție la deșeurii; nu poate fi refolosită. 	
<ul style="list-style-type: none"> Scoateți grilajul de protecție din baia de parafină după fiecare utilizare. 	

8. Curățare

⚠ Atenție

Dacă aparatul este utilizat de o singură persoană, schimbați periodic parafina și curățați și baia de parafină.

Dacă aparatul este folosit de mai multe persoane, se recomandă ca, din motive de igienă, parafina să fie schimbată înainte de fiecare utilizare.

<ul style="list-style-type: none"> • Scoateți ștecărul din priză. • Scoateți grilajul de protecție din baia de parafină. • Lăsați baia de parafină să se întărească peste noapte. 	
<p>⚠ Avertizare Nu folosiți obiecte tăioase sau ascuțite pentru a scoate blocul de parafină din baie. Puteți deteriora și zgâria baia de parafină.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Când parafina s-a întărit, apăsați pe un capăt al blocului de parafină și scoateți-l din baia de parafină. Dacă blocul de parafină nu poate fi scos, aduceți regulatorul de temperatură timp de 10 minute în poziția „warm”. Scoateți apoi ștecărul din priză și scoateți blocul de parafină din baie. 	
<ul style="list-style-type: none"> • În final, ștergeți interiorul băii de parafină cu o cârpă curată până când este uscat. <p>⚠ Atenție Nu introduceți niciodată apă în baia de parafină pentru a o curăța!</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • După curățare, depozitați baia de parafină într-un loc uscat, răcoros și ferit de praf. 	

9. Piese de schimb și piese de uzură

Număr de articol și număr de comandă

2x 450 g parafină + 30 de mănuși de plastic

589.42*

*Disponibil în comerț sau la punctul de service de la adresa menționată (în lista cu adrese ale punctelor de service)

10. Eliminarea ca deșeu

Vă rugăm să eliminați aparatul conform prevederilor Directivei – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind aparatele electrice și electronice vechi.

Pentru întrebări suplimentare adresați-vă autorității responsabile cu eliminarea deșeurilor.



11. Date tehnice

Nr. model	MP 70
Alimentarea cu tensiune	220–240 V, ~50/60Hz
Putere	80 W
Clasă de protecție	II / □ , IPX0
Dimensiuni (L x l x Î)	33 x 25 x 18 cm
Greutate	1 kg