

beurer

BY 90



RO Cântar pentru copii
Instrucțiuni de utilizare

CE



Citiți cu atenție prezentele instrucțiuni de utilizare, păstrați-le pentru consultarea ulterioară, puneți-le la dispoziția altor utilizatori și respectați indicațiile.

Prezentare

Dezvoltarea fizică a unui bebeluș necesită o cantitate ridicată de energie. Un control regulat al greutății este important în acest sens, oferind părinților un sentiment de siguranță cu privire la aportul alimentar corespunzător al bebelușului și dezvoltarea sănătoasă a acestuia. Cu ajutorul cântarelor pentru copii Beurer special concepute pentru aceștia, beneficiați în permanență de informații privind greutatea copilului dumneavoastră, pentru dezvoltarea optimă a acestuia.

Cântarul pentru copii prezintă următoarele caracteristici:

- Suprafață de cântărire curbată
- Display LCD mare, ușor de citit
- Funcție Hold automată și manuală pentru determinarea greutății bebelușilor care dau din picioare
- Bandă de măsurare integrată (150 cm)
- Funcție de cântărire tara
- Capacitate portantă 20 kg
- Divizare 5 g
- Funcție de oprire automată
- Conversia unității de măsură (kg/lb/oz)
- Salvarea ultimelor 10 măsurători
- Transmiterea valorilor de măsurare în aplicația „beurer BabyCare”

Cuprins

1. Pachet de livrare.....	3	8. Curățarea și întreținerea	11
2. Explicația simbolurilor	3	9. Ce este de făcut în cazul în care apar probleme?	11
3. Indicații de avertizare și de siguranță ...	4	10. Eliminarea ca deșeu	12
4. Utilizarea conform destinației	5	11. Date tehnice	13
5. Descrierea aparatului.....	6	12. Garanție / Service.....	13
6. Punerea în funcțiune.....	7		
7. Utilizare.....	10		

1. PACHET DE LIVRARE

Verificați pachetul de livrare pentru a vă asigura că starea ambalajului de carton este ireproșabilă și conținutul acestuia este complet. Înainte de utilizare, asigurați-vă că aparatul și accesoriile nu prezintă defecțiuni vizibile și că sunt îndepărtate toate materiile de ambalare. Dacă aveți îndoieli, nu utilizați aparatul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienți, la adresa menționată. I

- Instrucțiuni succinte
- Cântar pentru copii BY 90
- 3 x baterii 1,5V AAA (GLR03A)
- Prezentele instrucțiuni de utilizare

2. EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR

Pe aparat, în instrucțiunile de utilizare, pe ambalaj și pe plăcuța de identificare a aparatului sunt utilizate următoarele simboluri:

	AVERTIZARE Indicație de avertizare privind pericolele de vătămare sau pericolele pentru sănătatea dumneavoastră
	ATENȚIE Indicație de siguranță privind posibila defectare a aparatului/accesoriilor
	Informație privind produsul Indicație privind informații importante
	Citiți instrucțiunile
	Eliminare în conformitate cu prevederile Directivei CE – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
	Separați componentele ambalajului și eliminați-le conform reglementărilor locale.
	Marcaj pentru identificarea materialului de ambalare. A = Abrevierea pentru material, B = Numărul materialului: 1-7 = Material plastic, 20-22 = Hârtie și carton
	Separați produsul și componentele ambalajului și eliminați-le în conformitate cu reglementările locale.
	Nu eliminați la gunoierul menajer baterii care conțin substanțe nocive
	marcaj de evaluare a conformității pentru Regatul Unit
	Curent continuu Aparatul este adecvat numai pentru curent continuu
	Producător
	Marcaj CE Acest produs îndeplinește cerințele directivelor europene și naționale în vigoare.

3. INDICAȚII DE AVERTIZARE ȘI DE SIGURANȚĂ



AVERTIZARE

Instrucțiuni de siguranță

- Nu lăsați ambalajul la îndemâna copiilor (pericol de sufocare).
- În cazul înghițirii bateriilor, acestea vă pot pune în pericol viața. Nu lăsați bateriile și cântarul la îndemâna copiilor. În cazul înghițirii unei baterii, apelați imediat la ajutor medical.
- Protejați cântarul pentru copii împotriva șocurilor, umezelii, prafului, substanțelor chimice, fluctuațiilor puternice de temperatură și surselor de căldură prea apropiate (cuptoare, radiatoare).
- Reparațiile trebuie efectuate numai de către serviciul pentru clienți Beurer sau de către comercianții autorizați.
- Nu acționați tastele cu forța sau cu obiecte ascuțite.



ATENȚIE

- Nu așezați obiecte pe cântar atunci când nu îl utilizați.
- Precizia cântarului poate fi afectată de câmpuri electromagnetice puternice (de ex. plită cu inducție, telefoane mobile).
- Înlăturați elementul de siguranță pentru transport, dacă există.



Indicații generale

- Sarcina admisă a cântarului este de max. 20 kg (44 lb, 705 oz). În cazul măsurării greutateii, rezultatele sunt afișate în unități de măsurare de 5 g (0,01 lb, 0,18 oz).
- În cazul unor rezultate de măsurare diferite (între cântar și aplicație), trebuie să se utilizeze exclusiv rezultatele de măsurare de la nivelul cântarului.
- În starea de livrare, cântarul este reglat la unitatea de măsură „kg”.

Indicații de siguranță privind manipularea bateriilor


- Introduceți întotdeauna bateriile corect, ținând cont de polaritatea acestora (+/-). Mențineți bateriile curate, în stare uscată și departe de apă. Alegeți întotdeauna tipul de baterie corect.
- Nu scurtcircuitați niciodată bateriile și contactele de la nivelul compartimentului pentru baterii.
- Nu încărcați, nu descărcați forțat, nu supraîncălziți, nu demontați, nu deformați, nu încapsulați și nu modificați niciodată bateriile.
- Nu sudați sau nu lipiți niciodată bateriile.
- Nu utilizați niciodată simultan baterii (noi și uzate) de la fabricanți diferiți ori cu o capacitate, dimensiune și tip diferite în interiorul unui aparat.
- **Pericol de explozie!** Nerespectarea punctelor menționate poate duce la vătămări, supraîncălzire, scurgere, aerisire, rupere, explozie sau foc.

- Dacă una dintre baterii s-a scurs, puneți-vă mănuși de protecție și curățați compartimentul pentru baterii cu o lavetă uscată.
- În cazul în care lichidul din celula bateriei intră în contact cu pielea sau ochii, clătiți locurile afectate cu apă și căutați ajutor de specialitate.
- **Pericol de înghițire!** Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor. În caz de înghițire, solicitați imediat asistență medicală.
- Nu lăsați niciodată copiii să schimbe bateriile dacă nu sunt supravegheați de un adult.
- Depozitați bateriile la distanță de obiecte din metal, în încăperi bine aerisite, uscate și răcite.
- Nu expuneți niciodată bateriile la raze directe ale soarelui sau la ploaie.
- În cazul unei perioade mai lungi de neutilizare, scoateți bateriile din aparat.
- Eliminați imediat ca deșeu bateriile descărcate, în mod corespunzător. Nu eliminați niciodată bateriile ca deșeu în foc.
- În timpul eliminării ca deșeu, depozitați bateriile separat de diferitele sisteme electrochimice.
- **ATENȚIE!** Risc de explozie la înlocuirea bateriei cu o baterie de tip greșit.
- Înlocuirea bateriei cu un tip incorect care poate afecta siguranța produsului.
- Aruncarea unei baterii în foc sau într-un cuptor fierbinte, sau strivirea ori tăierea mecanică a unei baterii, poate duce la o explozie.
- Dacă lăsați bateria într-un mediu cu temperatură extrem de ridicată, acest lucru poate duce la o explozie sau la scurgerea lichidului sau gazului inflamabil.
- În cazul în care o baterie este supusă unei presiuni extrem de scăzute a aerului, poate rezulta o explozie sau scurgerea lichidului sau gazului inflamabil.
- Evitați expunerea unei baterii la temperaturi extreme ridicate sau scăzute sau la presiune scăzută a aerului la altitudine ridicată în timpul utilizării, depozitării sau transportului.

4. UTILIZAREA CONFORM DESTINAȚIEI


Cântarul pentru copii este destinat exclusiv măsurării greutateii bebelușilor și a copiilor mici. Cântarul pentru copii nu este un aparat medical. Cântarul pentru copii este conceput exclusiv pentru uzul în domeniul privat și nu este adecvat pentru utilizarea în scopuri comerciale sau clinice. Cântarul pentru copii trebuie utilizat numai în scopul pentru care a fost conceput și în modul specificat în instrucțiunile de utilizare. Utilizarea necorespunzătoare poate fi periculoasă. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecțiuni cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau neglijentă a aparatului.

5. DESCRIEREA APARATULUI

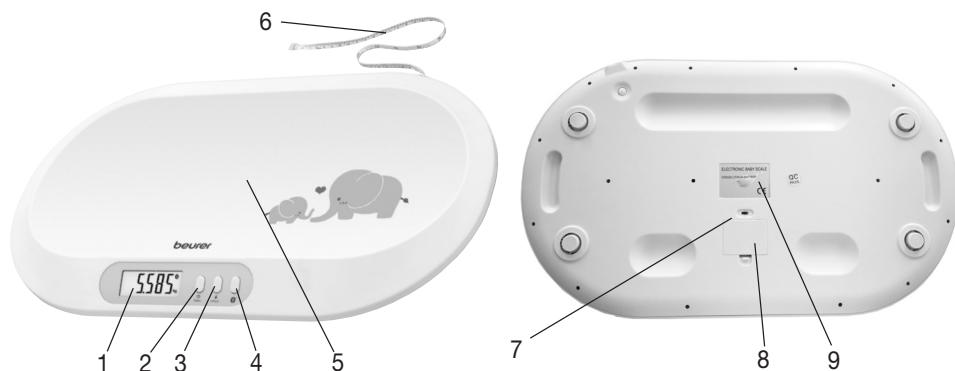

1. Display	6. Bandă de măsurare detașabilă
2. Tasta PORNIRE/OPRIRE/TARA ①	7. Buton de reglare a unității de măsură
3. Tasta HOLD 🗑️	8. Compartiment pentru baterii cu capac
4. Tastă Bluetooth® 📶	9. Plăcuța de identificare
5. Suprafață de cântărire	


Display

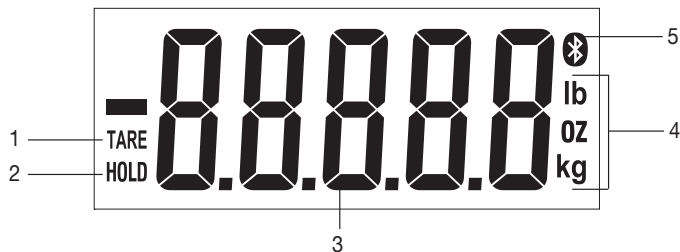

1. „TARE” (funcție TARA activă)	4. Unitate de măsurare a greutateii (kg, oz sau lb)
2. „HOLD” (funcție activată în momentul în care copilul stă nemișcat)	5. Simbol Bluetooth® (Bluetooth® este activat)
3. Afișarea greutateii	

Selectarea unității de măsurare a greutateii

În starea de livrare, cântarul pentru copii este reglat la unitatea de măsură kilogram, „kg”. Pe partea posterioară a cântarului pentru copii se află un buton pentru reglarea unității de măsură, cu ajutorul căruia puteți seta unitatea de măsură a greutateii la pfund „lb” sau uncii „oz”.

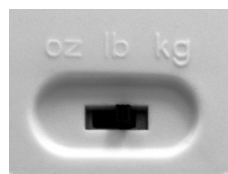


6. PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

Introducerea bateriilor

Înainte de a putea pune în funcțiune cântarul pentru copii, trebuie să introduceți în compartimentul pentru baterii al cântarului trei baterii alcaline de tip AAA, 1,5 V.

Procedați după cum urmează:

1. Deschideți capacul compartimentului pentru baterii de pe partea inferioară a cântarului pentru copii.
2. Introduceți trei baterii alcaline de tip AAA, 1,5V în compartimentul pentru baterii. Aveți grijă ca bateriile să fie introduse cu polaritatea corectă (+/-), conform marcajelor din compartimentul pentru baterii.
3. Închideți capacul compartimentului pentru baterii până ce acesta se fixează sonor și vizibil.

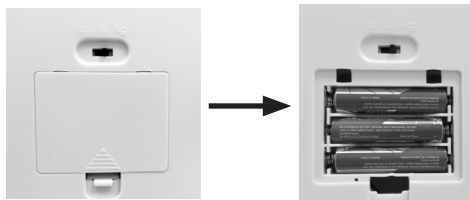

i Indicație

Dacă pe display apare „L0”, trebuie să înlocuiți bateriile.

Punerea în funcțiune prin aplicație

Prin intermediul aplicației „beurer BabyCare” puteți transmite valorile măsurate ale greutateii către smartphone-ul dumneavoastră prin *Bluetooth*[®].

Pentru a menține activată o conexiune *Bluetooth*[®] pe parcursul punerii în funcțiune, țineți smartphone-ul în apropierea cântarului.

Pentru a conecta cântarul pentru copii la smartphone, respectați pașii următori:

1. Activați funcția *Bluetooth*[®] în setările smartphone-ului.





i Indicație: Este posibil ca dispozitivele *Bluetooth*[®], precum acest cântar, să nu fie vizibile în lista de dispozitive *Bluetooth*[®] în cadrul setărilor generale.

2. Descărcați aplicația gratuită „beurer BabyCare” din Apple App Store (iOS) sau Google Play (Android™).
3. Porniți aplicația „beurer BabyCare” și urmați instrucțiunile.
4. Introduceți datele utilizatorului.
Următoarele setări trebuie să fie efectuate, respectiv înregistrate în aplicația „beurer BabyCare”:

Datele utilizatorului	Valori setate
Ziua de naștere	ZI, LUNĂ, AN




5. Introduceți bateriile și amplasați cântarul pentru copii pe o suprafață plană (pe display-ul cântarului luminează intermitent „Aplicație”).
 6. În aplicație, cântarul pentru copii este afișat timp de 120 de secunde și este posibilă conectarea acestuia la aplicație.
- i** Indicație: În cazul în care, la prima punere în funcțiune, cântarul pentru copii nu s-a conectat la aplicație, la repornirea cântarului, afișajul „APP” luminează intermitent timp


de 10 secunde. Mesajul dispare numai după ce s-a efectuat cu succes sincronizarea cu aplicația.

7. Cântarul pentru copii este conectat cu succes la aplicație atunci când pe display apare simbolul *Bluetooth*® .
8. Așezați acum bebelușul pe suprafața de cântărire. Acționați cu mare atenție, nu scăpați bebelușul și aveți grijă la capul acestuia.
9. Cântarul pentru copii dispune de o funcție „HOLD” (AUTO HOLD și MECHANICAL HOLD). Funcția AUTO HOLD activată în mod standard înregistrează greutatea bebelușului imediat ce acesta este suficient de liniștit pentru a înregistra o valoare exactă de măsurare. Dacă bebelușul se mișcă mult, nu se poate determina greutatea. Încercați din acest motiv să liniștiți bebelușul care dă din picioare pentru o măsurare rapidă. Nu atingeți însă bebelușul, pentru a nu influența măsurarea greutății. Imediat ce greutatea bebelușului este înregistrată, afișajul „HOLD” nu mai luminează intermitent și greutatea este afișată timp de 120 de secunde.
 **Indicație:** În cazul în care nu este posibilă determinarea automată a greutății în decursul a 8 secunde, cântarul pentru copii calculează valoarea medie a măsurătorilor efectuate pe parcursul a 4 secunde (afișaj intermitent al greutății pe display-ul cântarului pentru copii).
10. Greutatea se salvează în cântarul pentru copii și dispare automat după 120 de secunde. Pentru a dezactiva manual cântarul, țineți apăsată tasta PORNIRE/OPRIRE/TARA  timp de 3 secunde.
11. Dacă bebelușul dă foarte tare din picioare, puteți alege funcția MECHANICAL HOLD apăsând tasta „HOLD”. În decursul a 5 secunde, afișajul „HOLD” nu mai luminează intermitent și greutatea este afișată timp de 120 de secunde.
12. Pentru a transmite greutatea măsurată în aplicație, după realizarea cu succes a măsurătorii, apăsați tasta *Bluetooth*® .
13. După transmiterea cu succes, cântarul pentru copii se oprește automat.

Punerea în funcțiune fără aplicație


Vă recomandăm să efectuați punerea în funcțiune și toate setările în aplicația „beurer BabyCare” (a se vedea capitolul „Punerea în funcțiune cu aplicație”).

-  **Indicație:** Rezultatele măsurătorii salvate la nivelul cântarului pentru copii, fără sincronizarea în prealabil cu aplicația, nu pot fi transmise.
1. Așezați cântarul pentru copii pe o podea stabilă netedă; o suprafață stabilă este premisa pentru o măsurare corectă.
2. Pentru a porni cântarul pentru copii, apăsați tasta PORNIRE/OPRIRE/TARA . Pe display luminează intermitent timp de 120 de secunde „APP”. Apăsați orice tastă pentru a utiliza cântarul pentru copii fără aplicație.
3. Imediat ce a apărut „0.000 kg” pe display, cântarul pentru copii este pregătit pentru măsurare.
4. Așezați acum bebelușul pe suprafața de cântărire. Acționați cu mare atenție, nu scăpați bebelușul și aveți grijă la capul acestuia.
5. Greutatea este afișată timp de aprox. 120 de secunde și apoi dispare în mod automat. Pentru a efectua o măsurătoare nouă, apăsați tasta PORNIRE/OPRIRE/TARA . Pen-


tru a dezactiva manual cântarul, țineți apăsată tasta PORNIRE/OPRIRE/TARA  timp de 3 secunde.


Sincronizarea ulterioară cu aplicația

În cazul în care, la prima punere în funcțiune, cântarul pentru copii nu este sincronizat cu aplicația „beurer BabyCare”, puteți face acest lucru ulterior.

1. Pentru a porni cântarul pentru copii, apăsați tasta PORNIRE/OPRIRE/TARA .
2. Pe display-ul cântarului pentru copii luminează intermitent timp de 10 de secunde mesajul „APP”. Atunci când aplicația este deschisă, cântarul pentru copii se afișează în primele 10 de secunde și este posibilă conectarea la acesta.




Alternativ:

Apăsați tasta *Bluetooth*[®]  atunci când cântarul se află în funcțiune. Atunci când aplicația este deschisă, cântarul pentru copii se afișează timp de 120 secunde și este posibilă conectarea la acesta.

3. Cântarul pentru copii este conectat cu succes la aplicație atunci când pe display apare simbolul *Bluetooth*[®] .



Transmiterea rezultatelor măsurătorilor


Se pot memora până la 10 măsurători.

- Apăsați tasta *Bluetooth*[®] . Pe display începe să lumineze intermitent  (120 de secunde) până când se deschide aplicația. Apoi, în cazul în care conexiunea a fost efectuată cu succes, pe display se afișează continuu  până la transmiterea datelor. După transmiterea cu succes a rezultatelor măsurătorii, cântarul se oprește automat.

Dezactivarea funcției AUTO-Hold

În cazul în care doriți să utilizați cântarul pentru copii fără funcția AUTO-HOLD, o puteți dezactiva.

1. Imediat ce pe display apare „0.000 kg” apare, puteți apăsa tasta HOLD timp de 3 secunde pentru a dezactiva funcția AUTO HOLD.
2. Imediat ce a apărut „0.000 kg” pe display, cântarul pentru copii este pregătit pentru măsur.
3. Așezați acum bebelușul pe suprafața de cântărire. Acționați cu mare atenție, nu scăpați bebelușul și aveți grijă la capul acestuia.
4. Pentru a înregistra greutatea bebelușului, apăsați tasta HOLD. Greutatea se înregistrează timp de 5 secunde.
5. Greutatea este afișată timp de aprox. 120 de secunde și apoi dispare în mod automat. Pentru a efectua o măsurătoare nouă, apăsați tasta PORNIRE/OPRIRE/TARA . Pentru a dezactiva manual cântarul pentru copii, țineți apăsată tasta PORNIRE/OPRIRE/TARA  timp de 3 secunde.
6. Pentru a reactiva funcția AUTO-HOLD, țineți apăsată tasta HOLD timp de 5 secunde până când pe display se afișează „0.000 kg”.

 **Indicație:** Imediat ce pe display apare simbolul HOLD + ON, funcția AUTO-HOLD este activată.

Funcția TARA

Dacă nu doriți să lăsați bebelușul direct pe suprafața cântarului, ci de exemplu, pe un prosop, trebuie să așezați prosopul pe cântarul pentru copii înainte de pornirea acestuia. În cazul în care așezați un prosop sau alte obiecte pe cântarul pornit, pe care doriți să le utilizați înainte de cântărire, puteți utiliza, de asemenea, funcția TARA.

După ce ați apăsât tasta TARA, pe display se afișează „TARE”. Pentru a reseta cântarul la „0,000 kg”, prosopul sau obiectul trebuie îndepărtat de pe cântar și trebuie să apăsați din nou tasta TARA.

Utilizarea ruletei

În cazul în care doriți să măsurați bebelușul, extindeți ruleta de pe partea superioară a cântarului pentru copii. Pentru a ascunde din nou ruleta în cântarul pentru copii, apăsați tasta rotundă de lângă ruletă, de pe partea inferioară a cântarului pentru copii. Puteți introduce manual înălțimea și circumferința capului copilului dumneavoastră în aplicația „beurer BabyCare”.




7. UTILIZARE

Salvarea pe cântarul pentru copii a valorilor de măsurare și transferarea pe aplicație

La nivelul cântarului pentru copii pot fi memorate maxim 10 măsurători. Valorile măsurate memorate sunt transferate automat către aplicație, în situația în care accesați aplicația în raza de acțiune și *Bluetooth*® este activat la nivelul cântarului.

Nu este posibil un transfer automat atunci când cântarul pentru copii este oprit.

Ștergerea datelor cântarului

Pentru a șterge definitiv toate măsurătorile din cântarul pentru copii, țineți apăsată tasta *Bluetooth*®  timp de 5 secunde.

Înlocuirea bateriilor

Cântarul dumneavoastră dispune de un afișaj pentru înlocuirea bateriei. La utilizarea cântarului cu baterii prea slabe, pe ecran se afișează „LO”, iar cântarul se oprește în mod automat. În acest caz trebuie înlocuite bateriile (3 x 1,5 V AAA). Toate măsurătorile rămân salvate.

Indicație:

- După fiecare înlocuire a bateriei, cântarul pentru copii trebuie sincronizat din nou cu aplicația (a se vedea capitolul „Punerea în funcțiune cu aplicație”).
- Utilizați la fiecare înlocuire a bateriilor numai baterii de același tip, aceeași marcă și aceeași capacitate.
- Nu utilizați baterii reîncărcabile.
- Utilizați baterii fără metale grele.

8. CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Exactitatea valorilor măsurate și durata de viață a aparatului depind de manipularea atentă a acestuia:

Cântarul pentru copii trebuie curățat periodic.

Pentru curățare, utilizați o cârpă umedă pe care puteți aplica, dacă este necesar, puțin detergent de vase.



ATENȚIE

- Nu utilizați niciodată diluanți și agenți de curățare puternici!
- Nu scufundați cântarul pentru copii în apă!
- Nu spălați niciodată cântarul pentru copii sub jet de apă.
- Nu spălați cântarul pentru copii în mașina de spălat vase!

Depozitare

Dacă nu utilizați cântarul pentru copii un timp mai îndelungat, vă recomandăm să îl păstrați în ambalajul original într-un mediu uscat. Nu amplasați obiecte pe cântarul pentru copii în timpul depozitării acestuia. Nu lăsați cântarul pentru copii la îndemâna copiilor și a animalelor de companie. Scoateți bateriile din cântarul pentru copii.

9. CE ESTE DE FĂCUT ÎN CAZUL ÎN CARE APAR PROBLEME?

Mesaje afișate	Cauză	Remediere
Err	Cântarul nu este amplasat pe o podea plană și stabilă.	Amplasați cântarul pentru copii pe o suprafață netedă, pe care nu se află covor.
	S-a depășit capacitatea maximă de 20 kg.	Echilibrați din nou cântarul pentru copii. Supuneți cântarul numai unei sarcini de max. 20 kg.
Se afișează o greutate incorectă.	Cântarul nu este amplasat pe o podea plană și stabilă.	Amplasați cântarul pentru copii pe o suprafață netedă, pe care nu se află covor. Echilibrați din nou cântarul pentru copii.
Se afișează o greutate incorectă.	Bebelușul dă prea mult din picioare.	Încercați să liniștiți bebelușul, astfel încât acesta să numai dea din picioare.
Se afișează o greutate incorectă.	Cântarul are fixat incorect punctul zero.	Opriti și reporniți cântarul pentru copii. Așteptați până când pe cântarul pentru copii apare „0.000 kg” și repetați măsurătoarea.

Nicio conexiune Bluetooth® (lipsă simbol ®).	Aparatul este în afara razei de acțiune.	Raza de acțiune minimă în câmp deschis este de aprox. 15 m. Pereții și planșeele diminuează raza de acțiune. Alte unde radio pot perturba transmisia. Din acest motiv, nu amplasați cântarul pentru copii în apropiere de echipamente precum router WLAN, cuptor cu microunde, plită cu inducție.
	Funcția Bluetooth® este dezactivată la nivelul cântarului.	Apăsăți tasta Bluetooth® ® până când pe display luminează ® .
	Nu există o conexiune la aplicație.	Închideți aplicația complet (și din fundal). Opriți și reporniți Bluetooth® . Opriți și reporniți smartphone-ul. Îndepărtați bateriile cântarului pentru copii pentru scurt timp și apoi reintroduceți-le. Consultați secțiunea de întrebări frecvente (FAQ) de pe site-ul www.beurer.com .
Lo	Bateriile cântarului sunt consumate.	Înlocuiți bateriile cântarului pentru copii.
APP	Cântarul pentru copii nu a fost sincronizat cu aplicația. Toate măsurătorile efectuate fără sincronizarea anterioară a cântarului pentru copii cu aplicația nu au putut fi transmise.	Conectați din nou cântarul pentru copii la aplicație (a se vedea capitolul „Punerea în funcțiune cu aplicație”).

10. ELIMINAREA CA DEȘEU

În vederea protejării mediului înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat la gunoiul menajer la finalul duratei de viață.

Eliminarea se poate realiza prin intermediul centrelor de colectare corespunzătoare din țara dumneavoastră. Eliminați aparatul conform prevederilor Directivei – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind aparatele electrice și electronice vechi. Pentru întrebări suplimentare, adresați-vă autorității locale responsabile pentru eliminarea deșeurilor.



Eliminarea ca deșeu a bateriei


Bateriile uzate, complet goale, trebuie eliminate în recipientele de colectare special marcate, la firmele specializate sau la comerciantul de electrice. Aveți obligația legală să eliminați bateriile ca deșeu.

Bateriile care conțin substanțe toxice prezintă aceste simboluri:

Pb = bateria conține plumb,
Cd = bateria conține cadmiu,
Hg = bateria conține mercur.



11. DATE TEHNICE

Model	BY 90
Dimensiuni	560 x 330 x 47,5 mm
Greutate	1,35 kg (fără baterii)
Tensiune	max. 4.5 V
Temperatură de funcționare	max. 40 °C
Curent nominal	15 mA
Baterii cântar	3x 1,5V AAA
Interval de măsurare	0,050 kg - 20 kg (0,11 lb - 44 lb, 1,76 oz - 705 oz)
Memoria măsurătorilor	10 măsurări
Transfer de date prin Bluetooth(R) wireless technology	Produsul utilizează <i>Bluetooth®</i> low energy technology Bandă de frecvență 2400 MHz - 2480 MHz Putere de transmisie max. 8,0 dBm Compatibil cu smartphone-uri/tablete <i>Bluetooth®</i> ≥4.0
Cerințe de sistem pentru aplicația „beurer BabyCare”	iOS începând cu versiunea 9.0, Android™ începând cu versiunea 5.0 cu <i>Bluetooth®</i> ≥ 4.0.
Pentru lista smartphone-urilor compatibile, informații privind adăugarea simbolului codului QR și despre software, precum și pentru mai multe informații despre aparate, consultați: connect.beurer.com	

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de natură tehnică.

Confirmăm prin prezenta că acest produs corespunde Directivei europene RED 2014/53/UE. Declarația de conformitate CE pentru acest produs poate fi accesată pe: <https://www.beurer.com/web/de/andingpages/cedeclarationofconformity.php>

12. GARANȚIE / SERVICE

Pentru informații suplimentare privind garanția și condițiile de garanție, consultați broșura de garanție inclusă în pachetul de livrare.

