

beurer

MG 100



RO Aparat de tapotament
cu infraroșu
Instrucțiuni de utilizare

CE



Citiți cu atenție prezentele instrucțiuni de utilizare, păstrați-le pentru consultarea ulterioară, puneți-le la dispoziția altor utilizatori și respectați indicațiile.

AVERTIZARE

- Acest aparat poate fi utilizat de copii peste 8 ani și persoane cu capacitate fizică, senzorială sau mintală limitată sau fără experiență și cunoștințe necesare numai dacă sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele care rezultă din aceasta.
- Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul.
- Lucrările de curățare și întreținere destinate utilizatorului nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- În cazul în care cablul de racordare la rețea al acestui aparat este deteriorat, acesta trebuie eliminat. Dacă acesta nu este detașabil, aparatul trebuie să fie eliminat.
- Nu introduceți obiecte în orificiile aparatului sau între părțile mobile. Asigurați-vă că piesele mobile se pot mișca întotdeauna liber.
- Nu vă prindeți sau forțați nicio parte a corpului, în special degetele, între elementele de masaj mobile sau suporturile acestora.
- Suprafața aparatului este fierbinte. Persoanele care sunt sensibile la căldură trebuie să fie atente la utilizarea aparatului.
- Nu sunteți autorizat în niciun caz să demontați sau să reparați aparatul, în caz contrar nefiind posibilă garantarea unei funcționări ireproșabile. În cazul nerespectării, pierdeți garanția.

Conținut

1. Pachet de livrare.....	3	8. Curățarea și întreținerea	6
2. Explicația simbolurilor	3	9. Ce este de făcut în cazul în care apar probleme?	6
3. Utilizarea conform destinației.....	3	10. Eliminarea ca deșeu	7
4. Indicații de avertizare și de siguranță.....	4	11. Date tehnice	7
5. Descrierea aparatului.....	5	12. Garanție / Service.....	7
6. Punerea în funcțiune.....	5		
7. Utilizare.....	6		













1. Pachet de livrare

Verificați pachetul de livrare pentru a vă asigura că starea ambalajului de carton este ireproșabilă și conținutul acestuia este complet. Înainte de utilizare, asigurați-vă că aparatul și accesoriile nu prezintă defecțiuni vizibile și că sunt îndepărtate toate materialele de ambalare. Dacă aveți îndoieli, nu utilizați aparatul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienți, la adresa menționată.

- 1 x Aparat de tapotament cu infraroșu
- 2 x Elemente de masaj interschimbabile
- 1 x Prezentele instrucțiuni de utilizare

2. Explicația simbolurilor

Pe aparat, în instrucțiunile de utilizare, pe ambalaj și pe plăcuța de identificare a aparatului sunt utilizate următoarele simboluri:

	Avertizare Indicație de avertizare privind pericolele de accidentare sau riscurile pentru sănătatea dumneavoastră
	Atenție Indicație de siguranță privind posibile daune la nivelul aparatului/accesoriilor
	Informație privind produsul Indicație privind informații importante
	Citiți instrucțiunile
	Eliminare în conformitate cu prevederile Directivei WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
	Producător
	Aparat din clasa de protecție II Aparatul prezintă izolație dublă de protecție și corespunde, prin urmare, clasei de protecție 2
	Eliminați ambalajul în mod ecologic
	Marcaj CE Acest produs îndeplinește cerințele directivelor europene și naționale în vigoare.
	S-a demonstrat că produsele îndeplinesc cerințele reglementărilor tehnice ale Uniunii Economice Eurasiatice (UEE).
	A se utiliza exclusiv în spații interioare
	Marcaj de evaluare a conformității pentru Regatul Unit

3. Utilizarea conform destinației

Acest aparat este conceput pentru masarea părților individuale ale corpului uman. Nu poate înlocui însă tratamentul medical. Nu utilizați aparatul pentru masaj dacă vă regăsiți în una dintre situațiile prezentate în următoarele indicații de avertizare. În cazul în care nu sunteți sigur dacă aparatul de masaj este potrivit pentru dumneavoastră, vă rugăm să consultați medicul.



AVERTIZARE

Nu utilizați aparatul de masaj

- pentru animale;
- în cazul unui prolaps al nucleului pulpos sau al modificărilor patologice ale vertebrelor;
- pentru masaje în zona cardiacă în cazul în care beneficiați de un stimulator cardiac și consultați-vă medicul înainte de utilizarea aparatului și în alte regiuni ale corpului;
- în zone de piele și de corp umflate, arse, iritate sau rănite;
- în timpul sarcinii;

- pe față (ochi), pe laringe sau alte zone foarte sensibile ale corpului;
- în timpul somnului;
- după consumarea de medicamente sau alcool (capacitate redusă de percepție!).

Înainte de a utiliza aparatul, vă recomandăm să vă consultați medicul

- dacă suferiți de o afecțiune gravă sau dacă ați suferit o intervenție chirurgicală;
- în cazul răcelii însoțite de febră, varicelor, trombozei, tromboflebitelor, icterului, diabetului, problemelor sistemului nervos (de exemplu sciatică) sau inflamațiilor acute.

Aparatul poate fi utilizat numai în scopul descris în prezentele instrucțiuni de utilizare. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecțiuni produse ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau neglijente a aparatului.

4. Indicații de avertizare și de siguranță

Citiți cu atenție prezentele instrucțiuni de utilizare! Nerespectarea următoarelor indicații poate conduce la vătămări corporale sau daune materiale. Păstrați instrucțiunile de utilizare și permiteți și altor utilizatori accesul la acestea. Predați aceste instrucțiuni la înstrăinarea aparatului.



AVERTIZARE

Nu lăsați ambalajul la îndemâna copiilor. Există pericol de asfixiere.

Pericol de electrocutare



AVERTIZARE

Fiind un aparat electric, acest aparat de masaj se va utiliza cu atenție și precauție pentru a evita pericolul de electrocutare.

Prin urmare, utilizați aparatul

- numai la tensiunea de rețea menționată pe aparat;
- doar dacă aparatul sau accesoriile acestuia nu prezintă defecte vizibile;
- niciodată în timpul unei furtuni cu trăsnete.

În cazul defectelor sau deranjamentelor în funcționare, opriți imediat aparatul și scoateți-l din priză. Nu trageți de cablul electric sau de aparat pentru a scoate ștecărul din priză. Nu țineți și nu transportați niciodată aparatul de cablul de alimentare. Nu apropiați cablurile de suprafețele calde. Nu dezasamblați aparatul, indiferent de situație.

În situația în care cablul de alimentare al aparatului este deteriorat, este necesară înlocuirea acestuia de către producător sau de un centru autorizat de relații cu clienții pentru a se evita rănirea.

Asigurați-vă că aparatul de masaj, ștecărul și cablul nu intră în contact cu apa sau alte lichide.

Prin urmare, utilizați aparatul

- numai în spații interioare uscate;
- doar dacă aveți mâinile uscate;
- niciodată în cadă, sub duș sau lângă chiuvete pline cu apă;
- niciodată în piscine, căzi cu hidromasaj sau la saună;
- niciodată în aer liber.

Nu băgați niciodată mâna după un aparat căzut în apă. Scoateți imediat ștecărul din priză.

Reparații



AVERTIZARE

Efectuarea lucrărilor de reparații la echipamentele electrice este permisă numai persoanelor de specialitate. Reparații efectuate în mod necorespunzător pot cauza pericole majore pentru utilizator. Pentru efectuarea reparațiilor, contactați serviciul pentru clienți sau un comerciant autorizat.

Pericol de incendiu



AVERTIZARE

Utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea prezentelor instrucțiuni de utilizare poate duce în anumite condiții la incendii!

Din acest motiv, nu utilizați aparatul de masaj

- mai mult de 20 minute (pericol de supraîncălzire); lăsați aparatul să se răcească timp de minimum 15 minute înainte de următoarea utilizare;
- nesupravegheat, în special atunci când se află copii în apropiere;
- acoperit, de exemplu, cu o pătură, pernă, ...

Manipulare




ATENȚIE

Aparatul trebuie oprit și scos din priză după fiecare utilizare și înainte de fiecare operațiune de curățare.

- Asigurați-vă că piesele mobile se pot mișca întotdeauna liber.
- Aveți grijă să nu se prindă fire de păr în aparat.
- Evitați contactul cu obiecte ascuțite sau tăioase.
- Nu îndoiți cablul.
- Protejați aparatul împotriva surselor de căldură prea apropiate, cum ar fi aragazuri, radiatoare sau lumină solară directă.

5. Descrierea aparatului

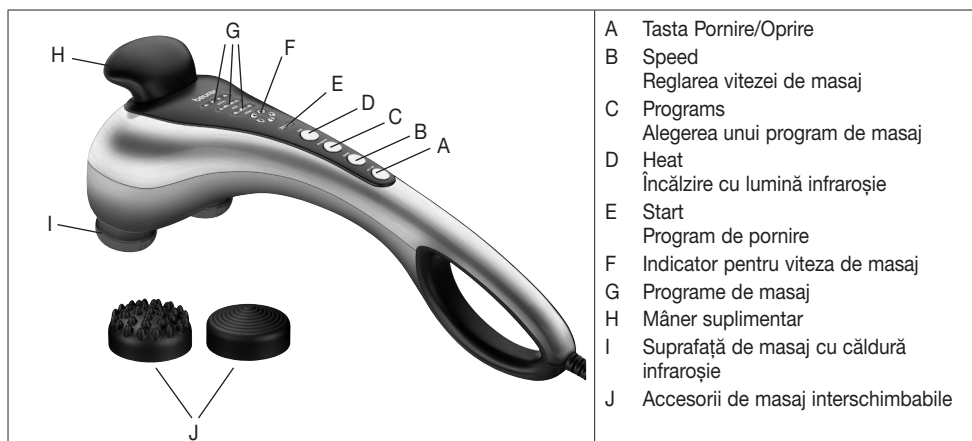

6. Punerea în funcțiune

- Îndepărtați ambalajul și folia de protecție a aparatului
- Verificați aparatul, ștecărul și cablul cu privire la deteriorări.
- Racordați aparatul la rețeaua electrică. Aparatul trebuie să fie oprit.
- Amplasați cablul într-o zonă unde nu există pericol de împiedicare.

7. Utilizare

Asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de a cupla cablul de alimentare. Porniți aparatul cu ajutorul tastei Pornire/Opre. Se activează programul de pornire.

În caz de necesitate puteți mări/reduce cu o treaptă viteza de masaj apăsând tasta „Speed”.

Prin apăsarea tastei „Programs” puteți alege între 3 programe de masaj diferite (cu trepte de viteză automate).

- **Relax:** masaj relaxant sub formă de valuri.
- **Vital:** masaj înviorător și pulsant.
- **Active:** masaj pulsant cu efect în adâncime.

Funcția de încălzire cu lumină infraroșie poate fi activată în paralel cu toate programele de masaj apăsând tasta „Heat”.

Conduceți aparatul cu una sau cu ambele mâini în regiunea corpului care urmează a fi masată. Puteți sta în picioare, așezat sau culcat și vă puteți masa pe dumneavoastră sau puteți masa o altă persoană. Apăsând mai puternic sau mai puțin puternic aparatul de masaj puteți modifica intensitatea de masaj. Nu masați o anumită regiune a corpului mai mult de 3 minute; treceți după această perioadă la altă regiune a corpului.

După o utilizare de maximum 20 minute, decuplați aparatul și lăsați-l să se răcească. Depozitați aparatul într-un loc uscat.

Indicație

- Nu folosiți aparatul cu scurt timp înainte de a merge la culcare. Masajul poate avea efect stimulant și poate provoca tulburări ale somnului.
- Aparatul prezintă o funcție de oprire automată setată la o durată maximă de utilizare de 20 minute.

AVERTIZARE

- Masajul trebuie resimțit întotdeauna ca plăcut și relaxant. Întrerupeți masajul sau schimbați poziția aparatului de masaj dacă masajul vă provoacă dureri sau o senzație de disconfort.
- Nu introduceți și nu prindeți părți ale corpului, în special degete, în zona capului de masaj.

8. Curățarea și întreținerea

Curățare

Ștergeți aparatul scos din priză și răcit cu o cârpă de microfibre ușor umezită. Puteți utiliza un detergent blând.

AVERTIZARE

- Scoateți aparatul din priză înainte de orice operațiune de curățare.
- Curățați aparatul doar conform instrucțiunilor. Se interzice cu desăvârșire pătrunderea de lichide în aparat sau accesorii.
- Utilizați din nou aparatul doar atunci când acesta este complet uscat.

Depozitare

Păstrați aparatul de masaj într-un loc uscat și răcoros, care nu se află la îndemâna copiilor. Vă recomandăm să îl păstrați în ambalajul original.

9. Ce este de făcut în cazul în care apar probleme?

Problemă	Cauză	Remediere
Capul de masaj nu se mișcă.	Aparatul nu este cuplat la rețeaua electrică.	Cuplați ștecărul și porniți aparatul.
	Aparatul nu este pornit.	Porniți aparatul.
	Protecția împotriva supraîncălzirii s-a declanșat.	Decuplați aparatul de la rețeaua de energie electrică, așteptați cel puțin 20 minute, cuplați-l din nou la rețeaua electrică și porniți-l.

10. Eliminarea ca deșeu



ATENȚIE

În vederea protejării mediului înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat cu reziduurile menajere la finalul duratei de viață. Eliminarea se poate realiza prin intermediul centrelor de colectare corespunzătoare din țara dumneavoastră. Eliminați aparatul conform prevederilor Directivei – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind aparatele electrice și electronice vechi. Pentru întrebări suplimentare, adresați-vă autorităților locale responsabile pentru eliminarea deșeurilor.



11. Date tehnice

Alimentare	220-240 V; 50 Hz; 20 W
Dimensiuni	45 x 16 x 14 cm
Greutate	ca. 1,74 kg

12. Garanție / Service

Pentru informații suplimentare privind garanția și condițiile de garanție, consultați broșura de garanție inclusă în pachetul de livrare.

