

beurer

TL 41



CE 0123

RO Lampă cu lumină naturală
Instrucțiuni de utilizare

Conținut

1. Prezentare.....	2	9. Eliminarea ca deșeu	7
2. Explicația simbolurilor.....	3	10. Ce este de făcut în cazul în care apar probleme? .	7
3. Indicații	3	11. Date tehnice.....	7
4. Descrierea aparatului.....	5	12. Garanție și service	8
5. Punerea în funcțiune	5		
6. Utilizare	6		
7. Curățarea și întreținerea aparatului	6		
8. Depozitare.....	7		

1. Prezentare

Stimată clientă, stimate client,

Ne bucurăm că ați ales un produs din gama noastră. Marca noastră este sinonimă cu produse de calitate, testate riguros, din domenii precum căldură, greutate, tensiune, temperatură corporală, puls, terapie, masaj și aer.

Cu deosebită considerație,

Echipele dumneavoastră Beurer

De ce este necesară utilizarea luminii naturale?

Când durata de strălucire a soarelui se reduce semnificativ toamna și oamenii petrec tot mai mult timp în interior pe parcursul lunilor de iarnă, se pot înregistra fenomene de deficiență de lumină. Acestea sunt denumite frecvent „depresie de iarnă”. Simptomele pot fi variate:

- Dezechilibru
- Atmosferă apăsată
- Lipsa de energie și de motivație
- Stare generală de indispoziție
- Necesari mai mare de somn
- Inapetență
- Dificultăți de concentrare

Cauza apariției acestor simptome este faptul că lumina și, în special, lumina solară, este vitală și acționează direct asupra corpului omenesc. Lumina solară controlează indirect producția de melatonină, eliberată în sânge numai în condiții de întuneric. Acest hormon indică organismului că este momentul pentru somn. Din acest motiv, în lunile cu nivel redus al luminii solare, se constată o producție mai intensă de melatonină. Astfel, trezirea este mai dificilă, deoarece funcțiile organismului sunt atenuate. În cazul în care lampa cu lumină naturală este utilizată dimineața imediat după trezire, ceea ce înseamnă cât mai devreme, poate fi oprită producția de melatonină, astfel încât să se poată înregistra o schimbare pozitivă a stării de spirit.

În mod suplimentar, în caz de insuficiență de lumină, este inhibat procesul de producție a serotoninei, hormonul fericirii, care influențează decisiv „starea noastră de bine”. Astfel, în cazul fototerapiei, este vorba despre modificări cantitative cu privire la hormonii și substanțele mesager din creier care pot influența nivelul nostru de activitate, sentimentele și starea de bine. Pentru a combate un astfel de dezechilibru hormonal, lămpile cu lumină naturală pot reprezenta un substitut adecvat pentru lumina solară naturală.


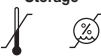










În domeniul medical, lămpile cu lumină naturală sunt utilizate în fototerapie împotriva fenomenelor de deficiență de lumină. Lămpile cu lumină naturală simulează lumina naturală peste 10.000 de lucși. Această lumină poate acționa asupra corpului omenesc și poate fi utilizată în scop terapeutic sau profilactic. Lumina electrică normală, în schimb, nu este suficientă pentru a influența echilibrul hormonal. Pentru că într-un birou bine iluminat, intensitatea luminii nu depășește, de exemplu, 500 de lucși.

Pachet de livrare:

- lampă cu lumină naturală
- prezentele instrucțiuni de utilizare

2. Explicația simbolurilor

Următoarele simboluri sunt folosite în instrucțiunile de utilizare sau la nivelul aparatului.

	Citiți instrucțiunile de utilizare		Umiditate a aerului și temperatură de depozitare admise
 Avertizare	Indicație de avertizare privind pericolele de vătămare sau pericolele pentru sănătatea dumneavoastră		Umiditate a aerului și temperatură de funcționare admise
 Atenție	Indicație de siguranță privind posibila defectare a aparatului/accesoriilor	 Indicație	Indicație privind informații importante.
	Număr de serie		Producător
	Simbolul CE atestă conformitatea cu cerințele de bază ale Directivei 93/42/EEC privind produsele medicale		Clasa de protecție II
IP 20	Protejat împotriva corpurilor străine solide, diametru de minim 12,5 mm	O/I	OFF/ON
	A se proteja împotriva umezelii		Eliminați ambalajul în mod ecologic

3. Indicații

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare, să le păstrați pentru consultarea ulterioară, să le puneți la dispoziția altor utilizatori și să respectați indicațiile.

Instrucțiuni de siguranță

Avertizare

- Lampa cu lumină naturală este destinată exclusiv tratării prin iradiere a corpului uman.
- Aparatul nu este destinat utilizării în scopuri comerciale sau clinice, ci exclusiv utilizării la domiciliu, pentru uz privat.
- Aparatul este potrivit pentru aplicații la domiciliu cu privire la sănătate. Pentru a utiliza aparatul, nu este necesară o instruire specială.
- Înainte de utilizare, asigurați-vă că aparatul și accesoriile nu prezintă defectuni vizibile și că sunt îndepărtate toate materialele de ambalare. Dacă aveți îndoieli, nu utilizați aparatul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienți, la adresa menționată.
- Asigurați, de asemenea, o stabilitate corespunzătoare a lămpii cu lumină naturală.
- Aparatul trebuie racordat numai la tensiunea indicată pe plăcuța de identificare.
- Nu scufundați aparatul în apă și nu îl utilizați în încăperi cu un nivel ridicat de umiditate.
- A nu se utiliza pentru persoane neajutorate, copii care nu au împlinit vârsta de 3 ani sau persoane care nu tolerează căldura (persoane cu modificări maladive la nivelul pielii), după consumarea de medicamente analgezice, alcool sau droguri.
- Nu lăsați ambalajul la îndemâna copiilor (pericol de sufocare!).
- Nu permiteți copiilor să utilizeze aparatul ca jucărie.
- Aparatul nu trebuie acoperit, învelit sau împachetat atunci când este cald.
- Scoateți alimentatorul din priză și lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l atinge.
- Aparatul nu trebuie atins cu mâinile ude dacă se află în priză; nu este permisă sub nicio formă stropirea aparatului cu apă. Aparatul poate fi utilizat numai dacă este complet uscat.
- Introduceți și scoateți alimentatorul numai cu mâinile uscate și atingeți butonul PORNIRE/OPRIRE numai cu mâinile uscate.
- Nu apropiați cablul de alimentare de obiecte calde și flăcări deschise.
- Protejați aparatul împotriva șocurilor puternice.

- Nu scoateți alimentatorul din priză trăgând de cablul de alimentare. Trageți direct de alimentator pentru a-l scoate din priză.
- Nu utilizați aparatul dacă prezintă deteriorări sau dacă nu funcționează corect. În aceste cazuri, contactați serviciul pentru clienți.
- În cazul în care cablul de racordare la rețea al aparatului este deteriorat, acesta trebuie eliminat. Dacă acesta nu este detașabil, aparatul trebuie să fie eliminat.
- Ștecherul se folosește pentru decuplarea alimentării cu energie electrică. Poziționați aparatul în așa fel încât să puteți decupla în orice moment, cu ușurință, ștecherul de la alimentarea cu energie electrică.
- Deconectarea de la rețeaua de alimentare este garantată numai dacă se scoate alimentatorul din priză.
- Nu folosiți aparatul în cazul existenței compuşilor inflamabili de gaz de narcotizare cu aer, oxigen sau oxid de azot.
- La acest aparat nu trebuie să realizați calibrări și să efectuați verificări preventive și lucrări de întreținere.
- Nu puteți repara aparatul. Acesta nu conține componente pe care le puteți repara.
- Nu modificați aparatul fără permisiunea producătorului.
- Dacă aparatul a fost modificat, trebuie efectuate teste și verificări amănunțite pentru a garanta în continuare siguranța în cazul utilizării ulterioare a acestuia.

Indicații generale

Atenție

- În cazul în care ați fost supus(ă) unei intervenții chirurgicale la ochi, consultați un medic înainte de utilizare.
- În cazul în care ați fost diagnosticat(ă) cu o afecțiune oculară, care necesită evitarea luminii puternice, consultați un medic înainte de utilizare.
- În cazul în care suferiți de depresii severe, consultați un medic înainte de utilizare.
- În cazul în care pielea dumneavoastră prezintă fotosensibilitate, (de ex. lupus eritematos sistemic), consultați un medic înainte de utilizare.
- În cazul consumului de medicamente, de exemplu analgezice, antihipertensive și antidepressive, este necesară consultarea prealabilă a medicului cu privire la utilizarea lămpii cu lumină naturală.
- În cazul persoanelor cu afecțiuni la nivelul retinei, înainte de a începe utilizarea luminii naturale, este necesară consultarea oftalmologului, aceeași situație fiind aplicabilă pentru diabetici.
- Vă rugăm să nu utilizați în cazul unor afecțiuni oculare, de exemplu cataractă, glaucom, probleme ale nervului optic și în situația unor infecții ale corneii vitros.
- Dacă există dubii de orice natură privind starea de sănătate, consultați medicul dumneavoastră de familie!
- Înainte de utilizarea aparatului, îndepărtați întregul ambalaj.
- Becurile nu sunt acoperite de garanție.

Informații privind CEM

Avertizare

- Trebuie evitată utilizarea acestui aparat în imediata apropiere a altor aparate sau cu alte aparate suprapuse, deoarece acest lucru ar putea duce la o funcționare eronată. Dacă totuși este necesară utilizarea în modul descris, trebuie să vă asigurați că acest aparat și celelalte aparate funcționează corespunzător.
- Utilizarea de accesorii și alimentatoare care nu sunt incluse în pachetul de livrare al acestui aparat poate cauza emisii electromagnetice accentuate sau o rezistență electromagnetică redusă a aparatului și poate duce la o funcționare eronată.
- Dispozitivele de comunicații de înaltă frecvență portabile (inclusiv accesorii ale acestora, de exemplu, cablurile antenelor și antenele externe) nu trebuie utilizate la o distanță mai mică de 30 cm față de acest aparat și de cablul de racordare. Nerespectarea acestei indicații poate afecta performanța aparatului.
- În cazul în care aparatul pălpăie sau nu luminează din cauza interferențelor electromagnetice, modificați locul de amplasare a acestuia.
- Pentru a asigura menținerea siguranței de bază și a performanțelor esențiale în ceea ce privește interferențele electromagnetice de-a lungul întregii durate de viață preconizate, aparatul nu trebuie utilizat în apropiere (de ex. la distanță mai mică de 1,5 km) emițătorilor TV, FM și AM.

Reparații

Atenție


- Nu încercați să reparați aparatul pe cont propriu. Consecința unui astfel de demers ar putea fi reprezentată de producerea de răniri grave. În caz de nerespectare a acestei prevederi, se pierde garanția.
- Pentru efectuarea reparațiilor, contactați serviciul pentru clienți sau un comerciant autorizat.

- Nu folosiți aparatul dacă este deteriorat. În cazul în care aparatul nu funcționează, încercați să rezolvați problema cu ajutorul instrucțiunilor din capitolul „Ce este de făcut în cazul în care apar probleme?”. Dacă problema nu poate fi remediată, contactați serviciul pentru clienți sau un comerciant autorizat.

4. Descrierea aparatului

Privire de ansamblu

1. Ecran luminos
2. Carcasă partea posterioară
3. Picioare suport
4. Buton Pornire/Oprire
5. Cablu de alimentare cu ștecher
6. Picior suport
7. Gaură pentru agățarea pe perete

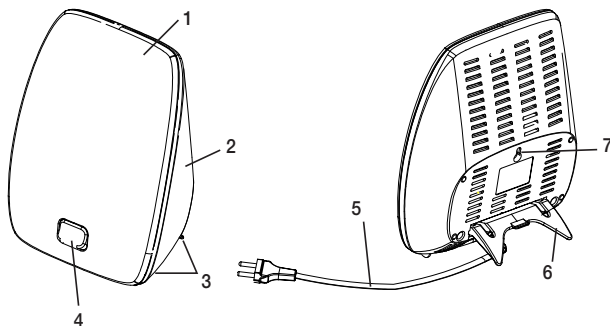

5. Punerea în funcțiune

Scoateți aparatul din folie. Verificați aparatul în privința deteriorărilor și defecțiunilor. Dacă observați deteriorări sau defecțiuni la nivelul aparatului, nu îl mai folosiți și contactați serviciul pentru clienți sau furnizorul dumneavoastră.

Amplasare

Amplasați aparatul pe o suprafață plană. Locul de amplasare trebuie ales în așa fel încât distanța dintre aparat și utilizator să fie cuprinsă între 20 cm și 45 cm. În aceste condiții, lampa asigură o eficiență optimă.

Agățarea pe perete

Puteți agăța lampa și pe perete. Pentru aceasta, aveți nevoie de un perete solid cu un element de suspendare stabil (pentru pereți din beton, spre exemplu, un șurub din oțel superior cu diblu M4 cu o lungime de 25 mm). Agățați acum aparatul prin intermediul găurii (se află în mijlocul părții posterioare a aparatului) de elementul de suspendare. Șurubul de tablă și diblul nu sunt incluse în pachetul de livrare.

⚠ Atenție

Dacă gaura de pe partea posterioară a aparatului prezintă fisuri sau deteriorări, nu agățați aparatul pe perete! Contactați pentru asistență serviciul pentru clienți sau comerciantul dumneavoastră.

ⓘ Indicație:

- Asigurați-vă că există o priză în apropierea locului de amplasare.
- Asigurați-vă că ștecherul este introdus complet în priză.
- Amplasați cablul de alimentare astfel încât să nu existe riscul împiedicării de acesta.

6. Utilizare

1	Pornirea lămpii ▶ Apăsăți butonul Pornire/Oprire.												
2	Bucurați-vă de lumină Poziționați-vă cât mai aproape de lampă, între 20 cm și 45 cm. Pe parcursul utilizării, vă puteți continua preocupările obișnuite. Puteți citi, scrie, telefona etc. <ul style="list-style-type: none">• Priviți periodic scurt direct în lumină deoarece absorpția, respectiv efectul, se produce prin intermediul ochilor/retinei.• Puteți utiliza lampa cu lumină naturală de câte ori doriți. Tratamentul este cel mai eficient dacă realizați fototerapia în conformitate cu orele indicate cel puțin 7 zile la rând.• Momentul cel mai eficient al zilei pentru realizarea tratamentului se încadrează între orele 6 dimineața și 8 seara, fiind recomandată o durată zilnică de 2 ore.• Nu priviți însă direct în lumină pe parcursul întregii durate de utilizare, putând exista riscul de supraexcitare a retinei.• Începeți cu o expunere de scurtă durată, cu creșterea intensității pe parcursul unei săptămâni.• Nu lăsați lampa cu lumină naturală nesupravegheată atunci când este utilizată. Indicație: După primele utilizări, pot apărea efecte secundare, precum dureri de ochi și de cap, precum și greață, care vor dispărea pe parcursul ședințelor ulterioare, deoarece sistemul nervos se obișnuiește cu noii stimuli. Nu utilizați lampa cu lumină naturală pentru câteva zile, până când efectele secundare trec, iar apoi încercați să o utilizați din nou.												
3	Care sunt aspectele de care trebuie să țineți cont Pentru o utilizare, distanța recomandată este de 20 - 45 cm între față și lampă. La rândul său, durata utilizării depinde de distanță: <table border="1"><thead><tr><th>Lușci</th><th>Distanță</th><th>Durată de utilizare</th></tr></thead><tbody><tr><td>10.000</td><td>aprox. 20 cm</td><td>0,5 oră</td></tr><tr><td>5.000</td><td>aprox. 30 cm</td><td>1 oră</td></tr><tr><td>2.500</td><td>aprox. 45 cm</td><td>2 ore</td></tr></tbody></table> În principiu, se aplică următoarele: Cu cât distanța față de sursa de lumină este mai mică, cu atât durata de utilizare este mai redusă.	Lușci	Distanță	Durată de utilizare	10.000	aprox. 20 cm	0,5 oră	5.000	aprox. 30 cm	1 oră	2.500	aprox. 45 cm	2 ore
Lușci	Distanță	Durată de utilizare											
10.000	aprox. 20 cm	0,5 oră											
5.000	aprox. 30 cm	1 oră											
2.500	aprox. 45 cm	2 ore											
4	Bucurați-vă de lumină pe parcursul unui interval mai lung Repețiți utilizarea în anotimpul cu nivel redus de lumină cel puțin 7 zile succesive, respectiv și mai mult, în funcție de cerințele individuale. Se recomandă aplicarea tratamentului la orele dimineții.												
5	Oprirea lămpii ▶ Apăsăți butonul Pornire/Oprire. Se sting LED-urile. Scoateți ștecherul din priză. ATENȚIE! Lampa este caldă după utilizare. Mai întâi, lăsați lampa să se răcească suficient înainte de demontarea și/sau ambalarea acesteia!												

7. Curățarea și întreținerea aparatului

Aparatul trebuie curățat periodic.

⚠ Atenție

- Evitați pătrunderea apei în interiorul aparatului!
Înainte de fiecare operație de curățare, aparatul trebuie oprit, scos din priză și răcit.
- Nu curățați aparatul niciodată în mașina de spălat!
Pentru curățare, utilizați o cârpă umezită ușor.
- Nu utilizați agenți de curățare puternici și nu țineți niciodată aparatul sub apă.
Aparatul nu trebuie atins cu mâinile ude, dacă se află în priză; nu este permisă sub nicio formă stropirea aparatului cu apă. Aparatul poate fi utilizat numai dacă este complet uscat.

8. Depozitare

Dacă nu folosiți aparatul timp îndelungat, depozitați-l neconectat la priză, într-un loc uscat, care nu se află la îndemâna copiilor.

Țineți cont de condițiile de depozitare cuprinse în capitolul „Date tehnice”.

9. Eliminarea ca deșeu

În vederea protejării mediului înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat cu reziduurile menajere la finalul duratei de viață.

Eliminarea se poate realiza prin intermediul centrelor de colectare corespunzătoare din țara dumneavoastră. Eliminați aparatul conform prevederilor Directivei – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind aparatele electrice și electronice vechi. Pentru întrebări suplimentare, adresați-vă autorității locale responsabile pentru eliminarea deșeurilor.



10. Ce este de făcut în cazul în care apar probleme?

Problemă	Cauză posibilă	Remediere
Aparatul nu luminează	Butonul Pornire/Oprire este dezactivat	Apăsați butonul Pornire/Oprire.
	Lipsește alimentarea cu curent electric	Cuplați ștecherul corect.
	Lipsește alimentarea cu curent electric	Cablul de alimentare este defect. Contactați serviciul pentru clienți sau comerciantul dumneavoastră
	S-a depășit durata de viață a LED-urilor. LED-uri defecte.	Pentru efectuarea reparațiilor, contactați serviciul pentru clienți sau un comerciant autorizat.

11. Date tehnice

Tip	MDLEDV2
Model	TL41
Dimensiuni (IHAd)	270 x 207 x 80 mm
Greutate	aprox. 645 g
Corp de iluminat	LED-uri
Intensitatea luminii	10.000 lucși (distanță: aprox. 20 cm)
Conexiune la rețea	220-240 V ~, 50 Hz; 0,3 A
Condiții de funcționare	de la 0°C până la +40°C, 30-90 % umiditate relativă a aerului, 700-1060hPa presiune atmosferică
Condiții de depozitare	de la -10°C până la +60°C, 30-90 % umiditate relativă a aerului, 700-1060hPa presiune atmosferică
Condiții de transport	de la -10°C până la +60°C, 30-90 % umiditate relativă a aerului, 700-1060hPa presiune atmosferică
Clasificarea produsului	Clasa de protecție II, IP20, fără element de utilizare, nu face parte din categoria AP sau APG, funcționare continuă
Locul de urgență a luminii	Ecran luminos (aprox. 440 cm ²)
Temperatura de culoare a LED-urilor	6.500 Kelvin
Durata de viață a LED-urilor	aprox. 10.000 ore
Grupa de risc a aparatelor care reprezintă o sursă de lumină	Conform IEC 60601-2-57: 2011 - clasificat ca grupa de risc 1
Durata de viață a produsului	5 ani

Puterea de radiație maximă a TL 41

Putere de radiație	Grup de risc clasificat conform IEC 60601-2-57: 2011	Valoare maximă
E _{UVA} : UV-A la nivelul ochilor	Grupă exceptată	$1,6 \times 10^{-4} \text{ W}\cdot\text{m}^{-2}$
ES: keratoză actinică indusă de UV la nivelul pielii și ochilor	Grupă exceptată	$1,5 \times 10^{-4} \text{ W}\cdot\text{m}^{-2}$
EIR: limitele expunerii periculoase la radiația cu raze infraroșii pentru ochi	Grupă exceptată	$5,7 \times 10^{-2} \text{ W}\cdot\text{m}^{-2}$
EH: risc termic pentru piele	Grupă exceptată	$3,1 \times 10^1 \text{ W}\cdot\text{m}^{-2}$
LB: lumină albastră	Grupa de risc 1	$1,1 \times 10^3 \text{ W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{sr}^{-1}$
LR: efect termic la nivelul retinei	Grupă exceptată	$2,4 \times 10^2 \text{ W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{sr}^{-1}$

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de natură tehnică.

Numărul de serie se află pe aparat.

Acest aparat corespunde cerințelor directivelor europene privind produsele medicale 93/42/EEC și 2007/47/EC, precum și legislației privind produsele medicale.

Acest aparat corespunde normei europene EN 60601-1-2 și se supune unor măsuri de precauție speciale cu privire la compatibilitatea electromagnetică. Vă rugăm să rețineți că dispozitivele de comunicații de înaltă frecvență

portabile și mobile pot influența funcționarea acestui aparat. Puteți solicita informații detaliate

la adresa menționată a serviciului pentru clienți sau puteți citi la sfârșitul instrucțiunilor de utilizare.

12. Garanție și service

În cazul obligațiilor de garanție, adresați-vă comerciantului local sau reprezentanței locale (a se vedea lista "Service internațional").

La returnarea produsului, anexați o copie a bonului fiscal și o scurtă descriere a defecțiunii.

Sunt valabile următoarele condiții de acordare a garanției:

1. Termenul de garanție pentru produsele BEURER este de 3 ani sau, în cazul în care este mai mare, este aplicabil termenul de garanție valabil de la data achiziționării din țara respectivă.

În cazul unei obligații de garanție, data achiziționării trebuie dovedită prin intermediul unui bon fiscal sau al unei facturi.

2. Efectuarea reparațiilor (la nivelul întregului produs sau al pieselor) nu duce la prelungirea termenului de garanție.

3. Garanția nu este valabilă în cazul defecțiunilor cauzate de

a. utilizarea necorespunzătoare, de exemplu, nerespectarea instrucțiunilor de utilizare.

b. reparațiile sau modificările efectuate de către client sau de către o persoană neautorizată.

c. transportul de la producător la client sau în timpul transportului către centrul de service.

d. Garanția nu este valabilă pentru accesoriile care sunt supuse uzurii în mod obișnuit (manșetă, baterii etc.).

4. Este exclusă răspunderea pentru daunele directe sau indirecte cauzate de produs și în situația în care este recunoscută o obligație de garanție în asociere cu defectarea produsului.

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY INFORMATION

The "TL 41" has been designed and manufactured to conform to the highest standards of safety and performance including electromagnetic compatibility (EMC).

The appliance is complied with the following emission and immunity standard, and test level:

Emissions Test Standard	Compliance
RF emissions CISPR 11:2009+A1:2010	Group 1, Class B
Harmonic emissions IEC 61000-3-2:2014	Class C
Voltage fluctuations/ flicker emissions IEC 61000-3-3:2013	Complies

Immunity Test Standard	Compliance level
Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2:2009	±8 kV contact ±15 kV air
Electrical fast transient/burst IEC 61000-4-4:2004	±2 kV, for power supply lines
Surge IEC 61000-4-5:2006	±1 kV line to line
Voltage dips, interruptions and variations on power supply input lines IEC 61000-4-11:2004	V_{NOM} : 230Vac Level of Reduction (dip): 500 mS at 30% of V_{NOM} and 100 mS at 60% of V_{NOM} Duration of Interruption ($>.95 * V_{NOM}$): 10ms
Power frequency (50/60 Hz) magnetic field IEC 61000-4-8:2009	30 A/m
Conducted RF IEC 61000-4-6:2003+A1:2004+A2:2006	3 V, 150 kHz to 80 MHz 6V (ISM/ Amateur radio band)
Radiated RF IEC 61000-4-3:2006+A1:2007	10 V/m 80 Hz to 2,7 GHz



Zero-Plus International Limited
Rm 1004, 10/F, Join-in Hang Sing Centre, 71-75 Container, Port Road
Kwai Chung, New Territories, Hongkong

Distributed by

BEURER GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
www.beurer.com • www.beurer-gesundheitsratgeber.com
www.beurer-healthguide.com



I-Plus Company Limited
4B Christchurch House, Beaufort Court,
Medway City Estate, Rochester, Kent, ME2 4FX
United Kingdom